


SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan

<https://www.seirin.jp>

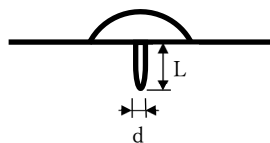

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

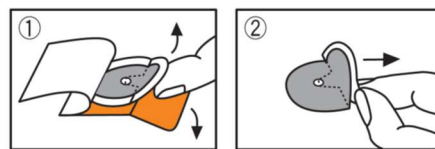

es SEIRIN PYONEX AGUJA

<Principio> Este producto cumple con ISO 18746 para agujas de acupuntura intradérmica estériles de un solo uso.

[Uso previsto, indicaciones]

Este producto está destinado a usarse para acupuntura.

Este producto está diseñado para ser usado solo por médicos autorizados (especialistas).

[Precaución de uso (tenga cuidado al usar las agujas en los pacientes siguientes).]

- Embarazadas (puede inducir el parto).
- Pacientes con tumores malignos (puede acelerar el crecimiento o la metástasis de tumores malignos).
- Pacientes con enfermedad hemorrágica (puede provocar sangrado).
- Pacientes con alergia a metales como níquel, cromo, y a otros componentes de acero inoxidable.

[Método de uso] • Manipule las agujas con cuidado para evitar lesiones, ya que están afiladas.

- 1) **Confirmación:** Confirme que el envase estéril no esté dañado, contaminado ni mojado, y no lo use si lo está
- 2) **Un solo uso:** Estas agujas de acupuntura Seirin están esterilizadas, y son desechables y de un solo uso. Reusarlas aumentaría el riesgo de infección.
- 3) **Desinfección:** Limpie el lugar de acupuntura con algodón empapado en alcohol, etc., y déjelo secar antes de insertar la aguja.
- 4) **Inspección visual:** Antes de usar una aguja, asegúrese de inspeccionarla. No la use si presenta alguna irregularidad, como torsión o daño.
- 5) **Abra el envase y extraiga el producto** ①: Retire el sello de la cubierta de la caja de plástico y levante la lengüeta en forma de media luna junto con la cinta, como se muestra en la figura. Puede doblar fácilmente la caja de plástico hacia atrás con los dedos.
- 6) **Aplicación** ②: Levante la lengüeta en forma de media luna junto con la cinta para aplicar la aguja (Pyonex) a la piel sin tocar el adhesivo de la cinta ni la punta de la aguja. Después, retire la lengüeta y presione la cinta.
- 7) **Después del uso:** Deseche las agujas de forma segura para evitar infecciones. Si no ha usado las agujas después de abrir el envase, no las use y deséchelas adecuadamente.
- 8) El material de la aguja no tolera el calor producido por moxibustión. No realice el tratamiento térmico con moxa sobre la cinta.
- 9) Esta aguja no está diseñada para usarse en electroterapia. No la use para estimulación eléctrica.
- 10) Indique a los pacientes que se retiren la cinta de la piel antes de ducharse, bañarse o nadar, ya que se desprenderá fácilmente.
- 11) Indique a los pacientes que eviten ejercer presión sobre el lugar donde esté aplicada la cinta.

[Reacciones adversas] El paciente puede experimentar dolor, picazón, somnolencia, malestar, náuseas, enrojecimiento, hinchazón y ampollas.

Si aparece alguna reacción anormal en la zona de tratamiento, como enrojecimiento y picazón, indique a los pacientes que consulten a un médico autorizado en acupuntura después de extraer la aguja.

[Método de almacenamiento] Almacene las agujas en un lugar seguro lejos de fugas de agua, luz solar directa, alta humedad y altas temperaturas, productos químicos y menores.

[Fecha de caducidad] La fecha de caducidad (basada en pruebas internas) se indica en la caja. Antes del uso, compruebe la fecha de caducidad, y no use productos caducados.

Notifique todos los sucesos graves asociados con este dispositivo al fabricante y a las autoridades sanitarias del estado miembro en el que resida el usuario y/o el paciente.