



## РУКА-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ P102

Тренажер для обучения остановке кровотечения из верхней конечности с реалистичной имитацией ран и кровотечения. Позволяет повысить эффективность обучения уходу за пациентами на догоспитальном этапе благодаря теоретической и практической подготовке по остановке кровотечения с наложением повязок и жгута. Данный тренажер особенно подходит для применения в рамках курсов по оказанию тактической медицинской помощи раненым в бою (ТССС) и оказанию гражданской медицинской помощи при ранениях.

Доступная по цене рука-тренажер для обучения остановке кровотечения P102 производства 3B Scientific является идеальным решением для реалистичного обучения остановке кровотечения и оказанию медицинской помощи при ранениях рук. Обучаемые обретут уверенность в оказании медицинской помощи при сложных кровотечениях с наложением жгута и повязок.



Тренажер также может быть надет добровольцем для дополнительного реализма и в полевых тренировках.

Тренажер позволяет отрабатывать следующие процедуры остановки кровотечения:

- Наложение жгута
- Наложение повязки на рану, в том числе на рану на стыке руки и туловища
- Применение XSTAT® (кровоостанавливающего устройства)



#### Техническое описание руки-тренажера для обучения остановке кровотечения Р102:

- Тренажер представляет собой имитацию целой верхней конечности взрослого мужчины, имеющей исключительно реалистичное внешнее анатомическое строение
- Покрытие изготовлено из высококачественного прочного силикона SKINlike™, имитирующего тактильные характеристики человеческой кожи и тканей
- Тренажер имеет костные анатомические ориентиры и пальпируемый кровеносный сосуд, поврежденный в результате огнестрельного ранения
- Непосредственная обратная связь: кровотечение прекращается (механическая окклюзия кровеносных сосудов) при правильном наложении жгута (размещении и фиксации)
- Жгут может накладываться по методу «выше места ранения с тугим пережатием» или на 5–8 см выше раны
- Каждая рана может быть прикрыта с помощью специальной наклейки для отработки сценариев различных видов ранений в разных отделах конечности
- Все раны кровоточат независимо друг от друга
- Тренажер предназначен для использования в полевых условиях, имея прочную конструкцию и не требуя питания от аккумулятора или внешнего источника
- Возможность легкой очистки и транспортировки в сумке для переноски (входит в комплект)
- Реалистичный бюджетный тренажер для многократного использования в обучении

#### Система имитации кровотечения:

- Защищенный от протечек резервуар для крови (2 литра) с системой ручного кровяного насоса, имитирующей пульсирующее венозное или артериальное кровотечение
- При наложении повязки на рану кровь не течет обратно в резервуар
- Содержит 250 мл концентрата искусственной крови для приготовления 2 литров крови

#### Комплект поставки:

- Рука с 3 различными травматическими ранами
- 3 наклейки на раны
- Система ручного кровяного насоса
- Сумка для переноски
- Ремень для крепления руки на человеке
- Резервуар для крови емкостью 2 литра
- Порошок крови (100 г)

Размеры и масса: 93 см, 3 кг

**1022652 Рука-тренажер для обучения остановке кровотечения Р102 - светлая кожа**

**1023313 Рука-тренажер для обучения остановке кровотечения Р102D - темная кожа**

**1023954 Порошок крови**

**1024091 Порошок крови (набор из 10 шт.)**

06/2020



БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА ВЕБ-САЙТЕ [3BSCIENTIFIC.COM](http://3BSCIENTIFIC.COM)



ООО «ЗБ Сайнтифик» • 196084, Россия • Санкт-Петербург • Московский пр., 79А, лит. А, офис 400  
Тел.: +7 812 3242223 • e-Mail: [sales.spb@3bscientific.com](mailto:sales.spb@3bscientific.com)