



Vista interna mentre si sutura una lacerazione vaginale

SIMULATORE DI EMORRAGIA POST PARTUM P97 PRO

Sviluppato in collaborazione con i più importanti ostetrici in Germania, il Simulatore di emorragia post partum (EPP) P97 PRO recentemente aggiornato è una soluzione ideale per eseguire sessioni di esercitazione e di addestramento realistico per il riconoscimento precoce, la valutazione sistematica e il trattamento della EPP. Se non diagnosticato e trattato, un sanguinamento severo dopo il parto può essere letale per la madre entro poche ore. Per migliorare gli esiti di una EPP, il simulatore di EPP P97 PRO di 3B Scientific consente ai team ostetrico e medico di eseguire delle esercitazioni per la gestione e l'assistenza tempestiva dell'emorragia post partum.

Con P97 PRO, possono essere valutate e trattate tre principali cause di sanguinamento post partum: tono, trauma e tessuto. Esso consente di regolare facilmente diversi livelli di tono uterino. Su questo simulatore di EPP, è possibile esercitarsi anche nella sutura di lacerazioni vaginali e gli inserti con lacerazione sono sostituibili. La placenta è realizzata in silicone per essere realistica e morbida al tatto. La placenta ritenuta può essere rimossa manualmente dalla cavità uterina per l'addestramento nell'esecuzione degli interventi medici richiesti. Grazie ad un serbatoio di sangue di 3000 mL e al sistema di tubazione compatto, possono essere simulati i principali scenari di EPP di grado severo.



- Perdita di sangue fino a 3000 mL
- Velocità regolabile del flusso ematico fino a 400 mL/min
- Possibilità di emorragie multiple

Silicone di alta qualità SKINlike™


Per una percezione aptica realistica dalla parete addominale attraverso il canale vaginale fino all'utero



Sanguinamento di origine cervicale
Cervice post partum realistica



Sanguinamento vaginale
Lacerazioni vaginali suturabili

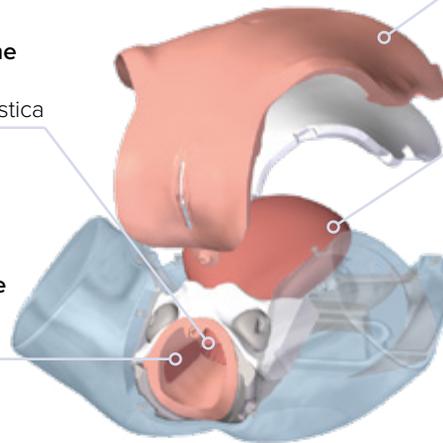

Sanguinamento dell'utero
Tono uterino regolabile



Espulsione di una placenta ritenuta



Il simulatore di EPP P97 Pro è ideale per esercitare le seguenti competenze, sia individualmente sia come team:

- Diagnosi di atonia uterina mediante esame addominale
- Pratica di massaggio del fondo uterino e di compressione bimanuale
- Sutura di lacerazioni vaginali
- Ispezione visiva della cervice a 360 gradi
- Rimozione manuale di una placenta ritenuta
- Tamponamento intrauterino con palloncino, ad es. palloncino di Bakri®
- Tamponamento uterino con garza
- Presentazione di casi severi di emorragia ostetrica
- Stima della perdita di sangue
- Cateterismo vescicale (no fluidi)
- Dimostrazione di tecniche compressive di sutura dell'utero

1023727 Simulatore di EPP P97 PRO

La confezione comprende:

- Simulatore di EPP P97 Pro
- Serbatoio di sangue da 3000 mL
- Connettore per sanguinamento con codifica a colori
- Placenta con tre residui
- Due uteri di schiuma
- Polvere di sangue (100 grammi)
- Lubrificante
- Kit ricambi (1x inserto con lacerazione, 1 set di residui)
- Supporto per asciugatura della cavità uterina
- Borsa per il trasporto



Disponibile anche come modulo aggiuntivo per il Simulatore di parto P90:

- 1023731 Modulo aggiuntivo per EPP
- 1022879 Simulatore di parto 3B P90 PRO
- 1022878 Simulatore di parto 3B P90 BASIC

09/2023

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL RAPPRESENTANTE 3B SCIENTIFIC



Italia 3B Scientific S.r.l. • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia
3bscientific.com • Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98 • vendite.italia@3bscientific.com

