

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Atlas Junior - Pediatrik ALS Simülatörü P76'yı satın aldığınız için teşekkür ederiz

Atlas Junior'ı REALTi 360 ile Bağlama: Basit Bir Kılavuz

Senaryo 1: Mevcut Wi-Fi yönlendiricinizin adı iSimulate-5.0

1. Güç verin: iSimulate-5.0 yönlendiricinizi açarak işleme başlayın.
2. Wi-Fi Bağlantısı: REALTi Monitor iPad ve Control iPad'in iSimulate-5.0 ağına bağlı olduğundan emin olun.



WiFi Adı: iSimulate-5.0
Şifre: iSimulate2012

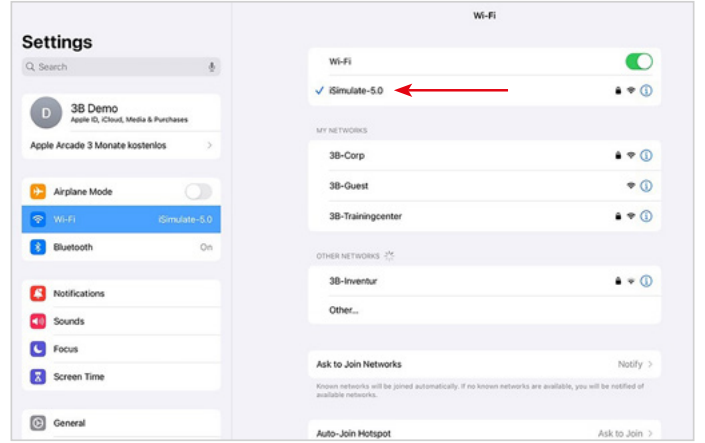



3. Atlas Junior'ı açın: Mankenin sağ tarafındaki güç düğmesini bulun ve basın. Mankenin otomatik olarak iSimulate-5.0 ağına eklenir.



4. Bluetooth Ayarları: Monitor iPad'de Bluetooth'u devre dışı bırakın, ancak Atlas Junior'ın Bluetooth'u ile eşleştirmek için Control iPad'de etkinleştirin.

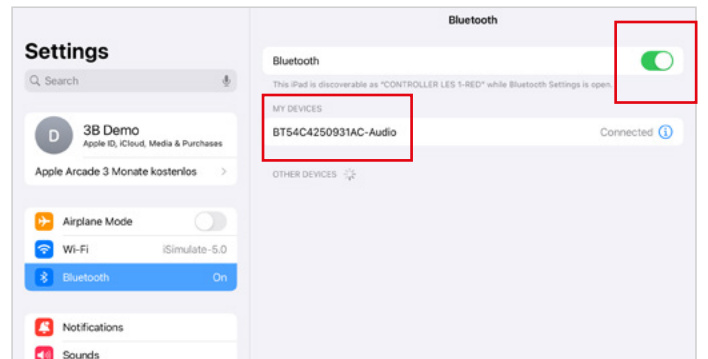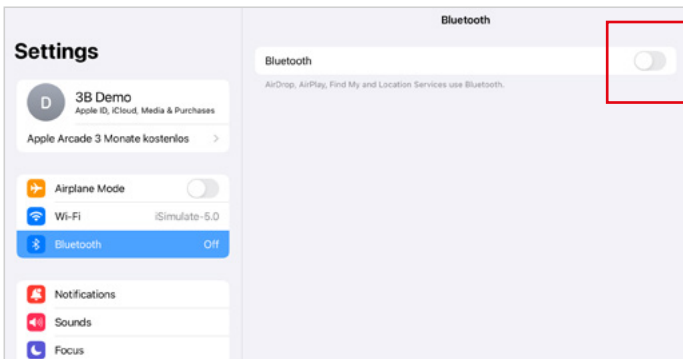


5. **REALiTi Uygulamasını başlatın:** Her iki iPad üzerinde de REALiTi uygulamasını açın, Monitor iPad'de 'Staging' ve Control iPad'de 'Control' seçin.

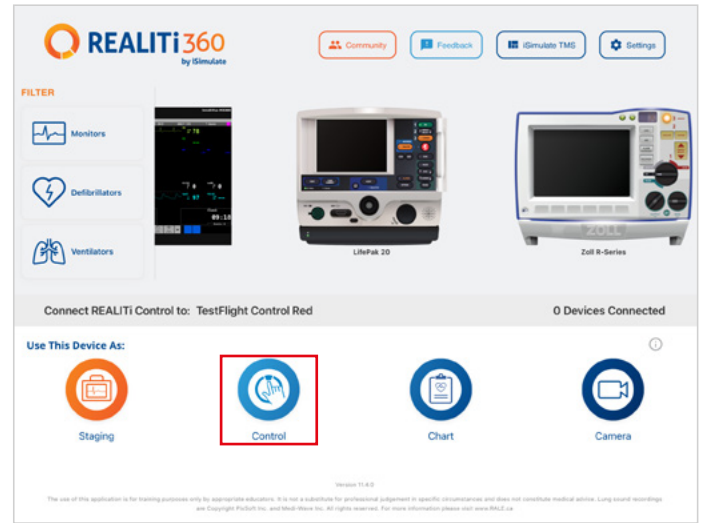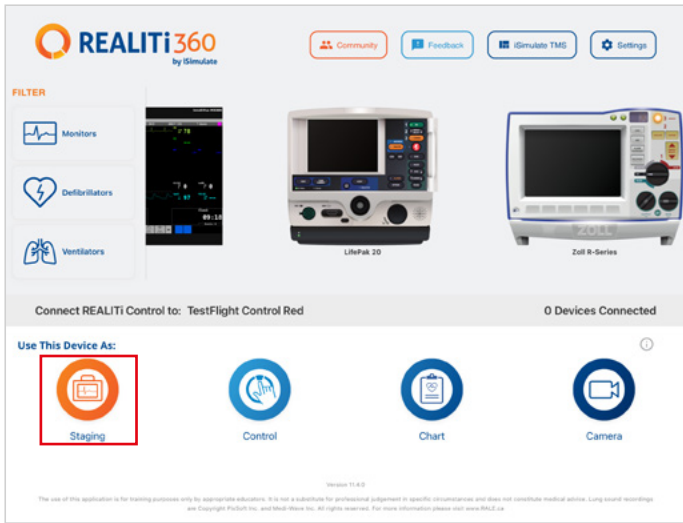


6. **iPad'leri bağlayın:** İki cihazı bağlamak için Control iPad'deki 'Bağlanmak için Dokun' özelliğini kullanın.


Monitor iPad listede görünmüyorsa, Staging iPad ve Monitor iPad'in REALiTi yönlendiricinizin Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kontrol edin: iSimulate-5.0 (her iki iPad de aynı Wi-Fi ağı üzerinde olmalıdır).

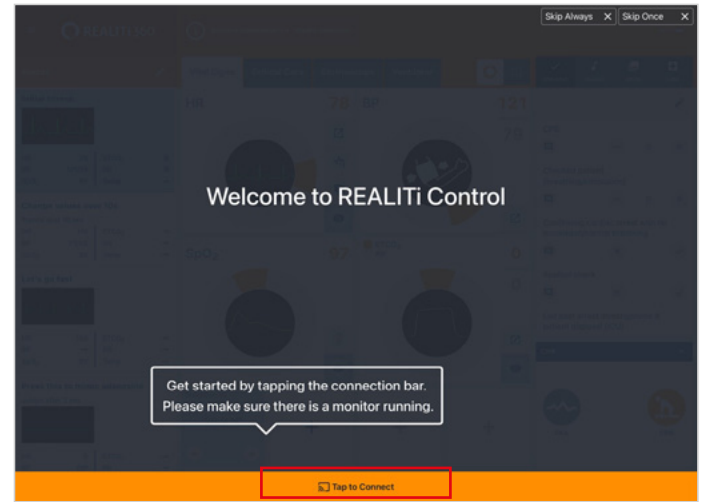


7. **Bir senaryo seçin ve başlatın:** Control iPad'den başlamak için bir senaryo veya monitör kurulumu seçin.

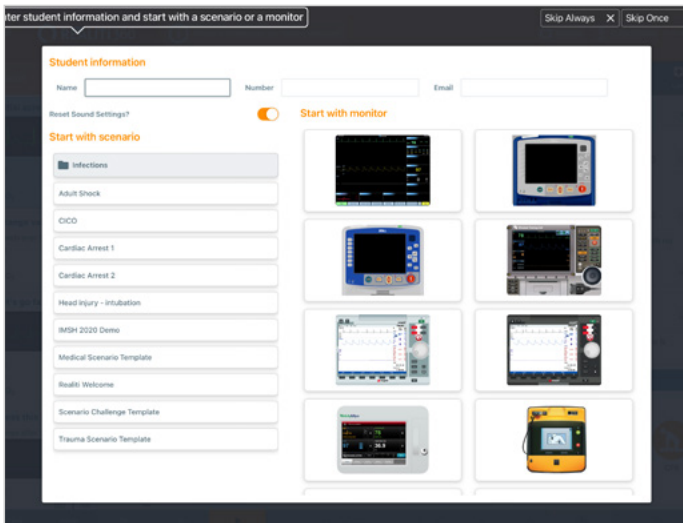


8. **Bir senaryo veya monitör seçin ve 'Başlat' düğmesine dokunun.** iPad ana menüsünden defibrilatörü başlatın:

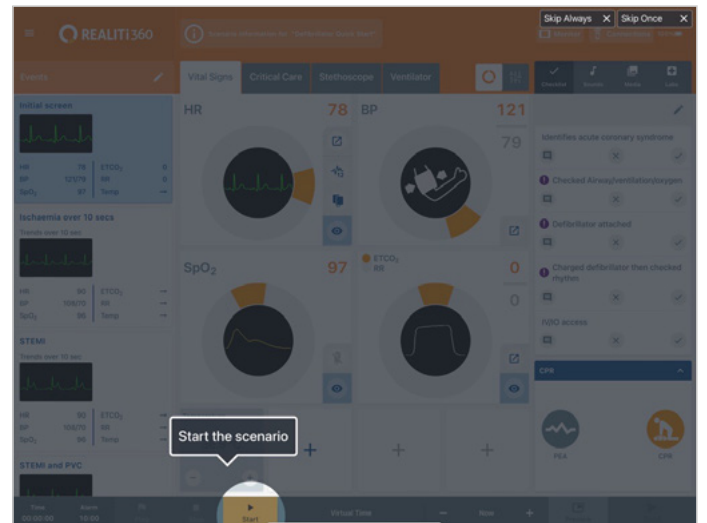


9. Monitor iPad'de, 7. adımda seçilen senaryo veya monitör görünmelidir. Defibrilatörü çalıştırın.

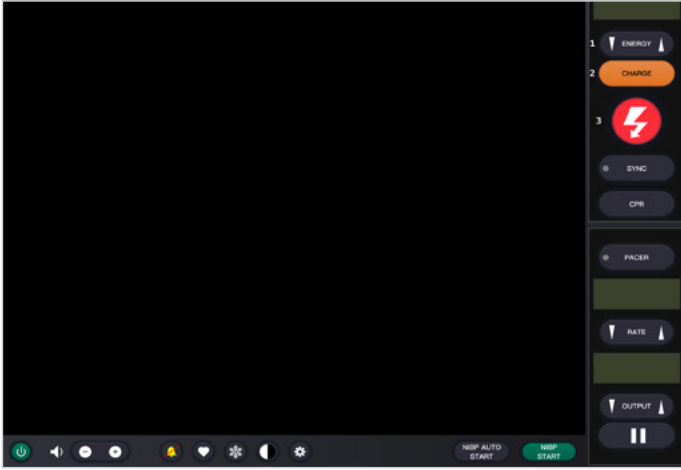

10. Atlas Junior'ı arayın: 'Available Devices'ı göstermek için Monitor iPad'in sağ ekran kenarından içeri kaydırın.

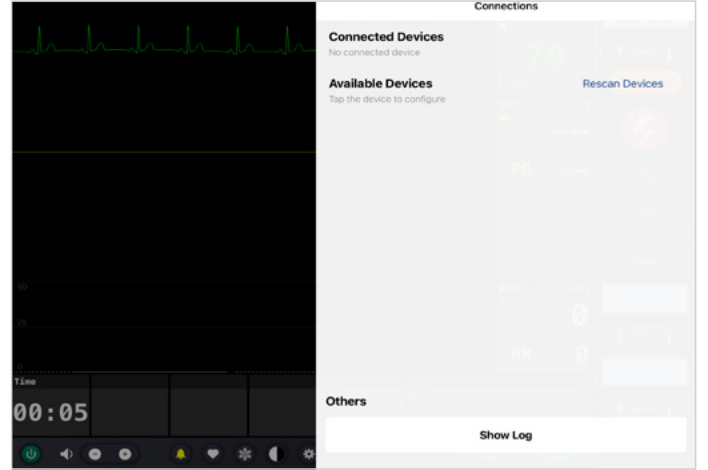

11. 'Rescan Devices' dokununuz. 'Connect Device' dokunarak mevcut cihazlardan 'Atlas Junior'ı seçin. Bağlı Atlas Junior otomatik olarak kalibre edilir. Mankenler bir karotis nabızı simüle eder.

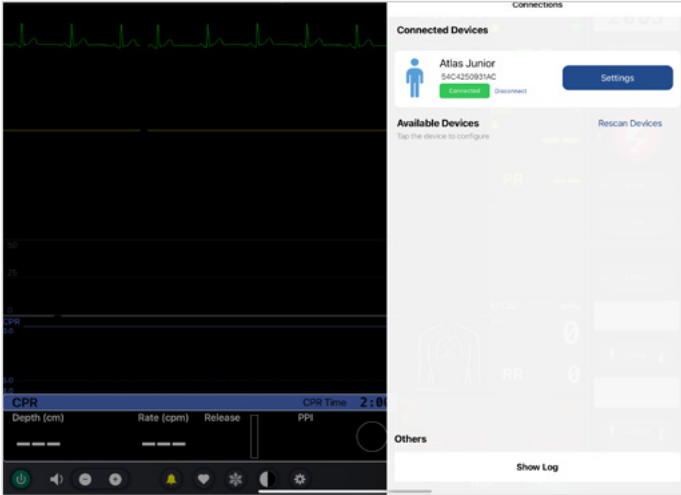


12. Simülasyonu başlatın: Mankene kompres uygulayın. CPR kompresyonunu EKG dalga formunda ve çubuk grafikte görebilirsiniz.



Senaryo 2: Mevcut Wi-Fi yönlendiricinizin adı iSimulate-5.0 değil


1. Bluetooth Ayarları: Monitor iPad'de Bluetooth'u açın ve Atlas Junior'a bağlanın.

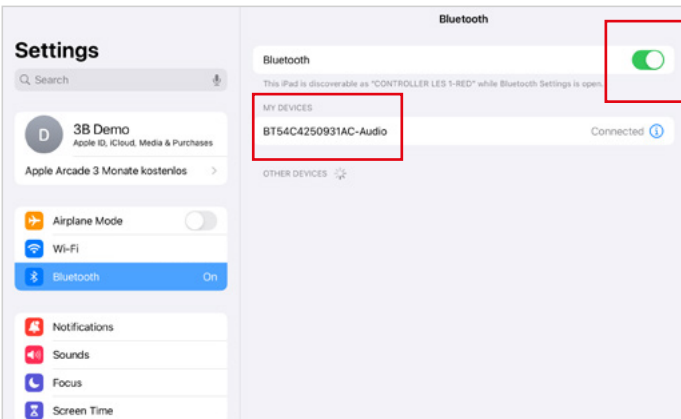


2. REALiTi Uygulamasını başlatın: Monitor iPad'de REALiTi uygulamasını çalıştırın ve 'Staging' düğmesini seçin:




3. **Atlas Junior'ı arayın:** 'Available Devices' menüsünü görüntülemek için Monitor iPad'in sağ kenarından içeri kaydırın. 'Rescan Devices' ögesini seçin ve 'Connect Device' dokunarak listeden 'Atlas Junior Wi-Fi Yapılandırması'nı seçin.

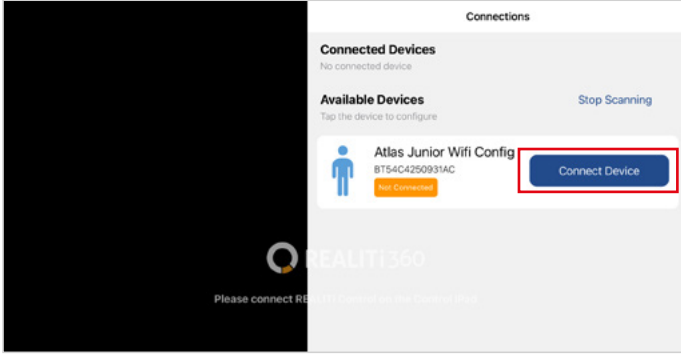


4. 'Atlas Junior Wi-Fi Yapılandırması'na başarıyla bağlandıktan sonra 'Ayarlar'a erişin.

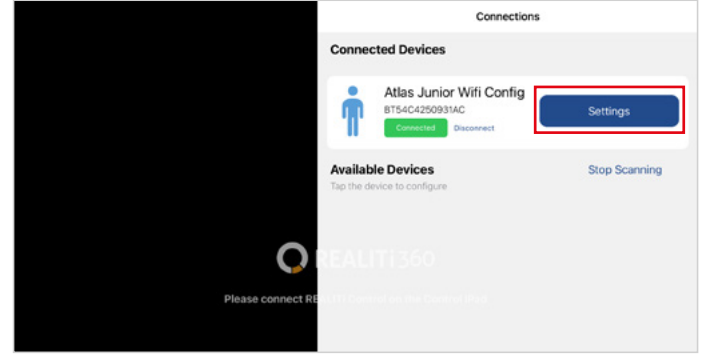


5. **Wi-Fi SSID'sini yeniden adlandırın:** Wi-Fi ağ adını yönlendiricinizle eşleşecek şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan Atlas Wi-Fi ayarları görüntülenir. Wi-Fi SSID'sinin (ad) ve şifrenin Wi-Fi yönlendiriciniz ile uyumlu olduğundan emin olun.

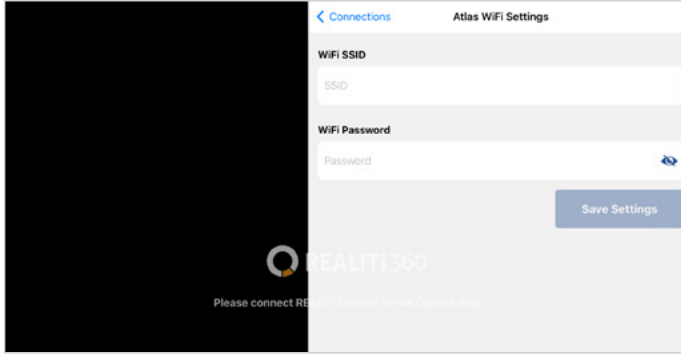

6. İsteddiğiniz Wi-Fi SSID'sini ve şifresini girdikten sonra, değişiklikleri Wi-Fi yapılandırmasına başarıyla uygulamak için 'Ayarları Kaydet'e dokunun.

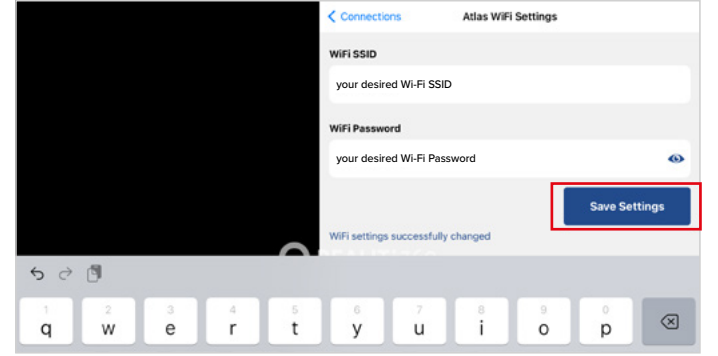

7. Ana ekran düğmesine iki kez dokunarak uygulamadan çıkın ve kapatmak için uygulamanın ön izleme kartını yukarı doğru kaydırın.
8. Atlas Junior'ı kapatın.
9. Monitor iPad'i ve Staging iPad'i yönlendiricinizin Wi-Fi ağına bağlayın. Her iki iPad de aynı Wi-Fi ağı üzerinde olmalıdır.
10. Senaryo 1'den 3. adımdan 12. adıma kadar takip edin.

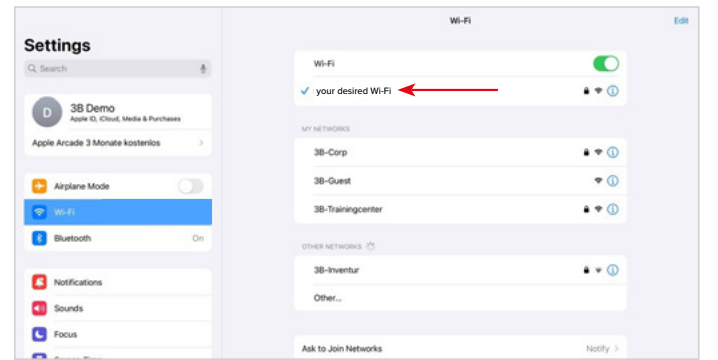

 **Atlas Junior çalışmaya hazır!**



03/2025



3B Scientific GmbH • Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany • 3bscientific.com

Phone: +49 40 73966-0 • **Fax:** +49 40 73966-100 • **E-mail:** info@3bscientific.com