


CPR*Lilly* PRO+

快速使用指南

CPRLilly PRO+快速使用指南

Part A. 开机与关机

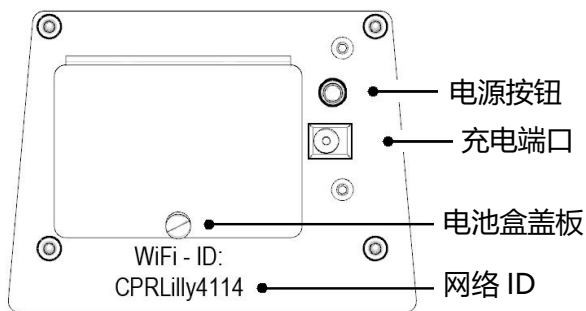

开机: 按住电源按钮约 2s, 绿灯常亮为开机成功。

关机: 长按至电源按钮 LED 灯闪烁, 松手即可。

Part B. 模拟人充电

将模拟人电源线连接充电端口, 电源按钮 LED 灯常亮, 即为充电。充满电可使用约 4-6 小时。

指示灯:

常亮: 电源已打开, 可以正常使用。

不亮: 电源关闭。


持续闪烁: 正在关闭。

闪烁一次: 正在充电, 电池没电了。

闪烁两次: 正在充电, 电池充至一半。

闪烁三次: 正在充电, 电池已充满。


Part C. 下载软件

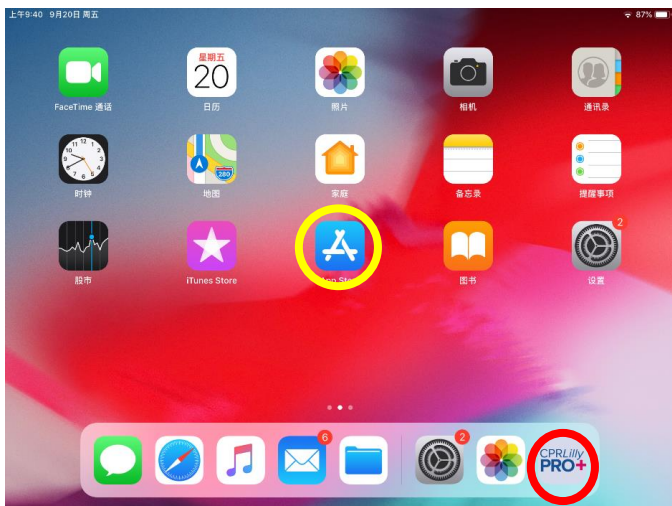

若平板电脑尚未安装 CPRLilly PRO+应用程序, 请按照以下步骤安装。(红色圈)


1. 打开 App Store。(黄色圈)
2. 在搜索框内输入“cpr lilly pro+” 点击搜索, 找到软件后下载安装。

3. 下载成功后开始操作。
4. 首先, 打开网络设置, 搜索模拟人 WiFi 信号, 名称通常为“CPRLillyXXX” 如下图:

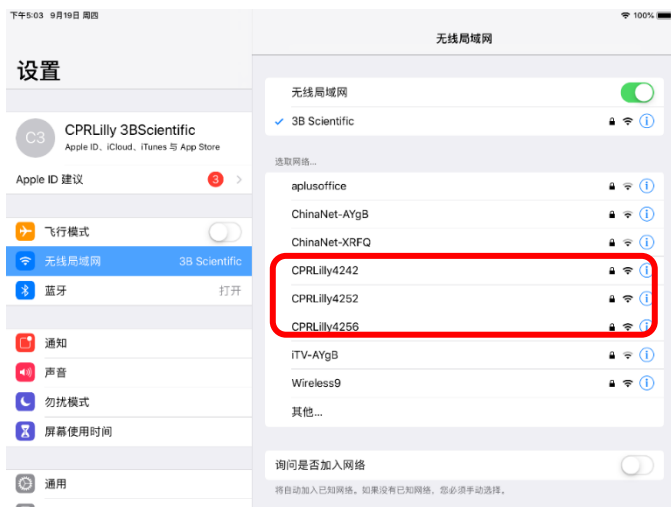


5. 然后, 连接 WiFi, WiFi 密码为: **simadmin**。
6. 最后, 连接成功后, 返回主页面, 打开应用软件。


Part D. 创建学生账户

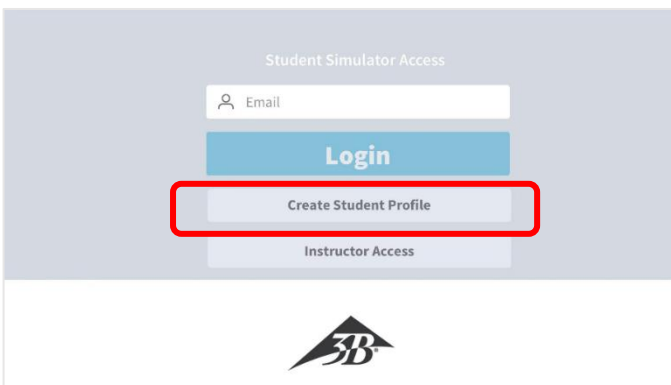

1. 点击创建学生账户。

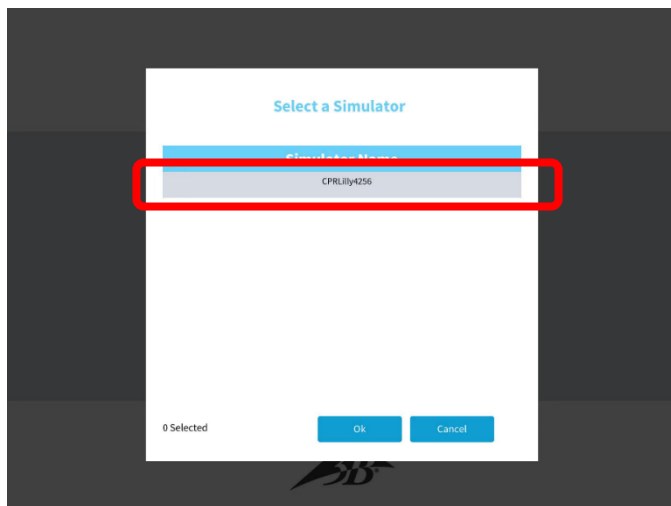


2. 选择操作所需模拟人, 在联机状态下会出现多个模拟人。

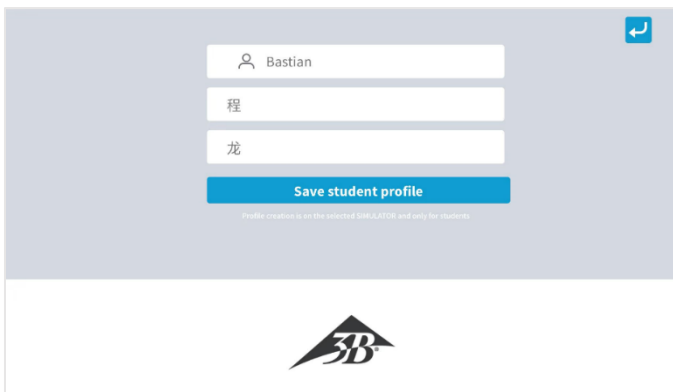

3. 进入学生账户创建页面。输入登录名和学生姓名。

注：首行为登录名，可以输入中文或邮箱。第二行输入姓、第三行输入名。


4. 输入完毕，点击“保存学生信息”。

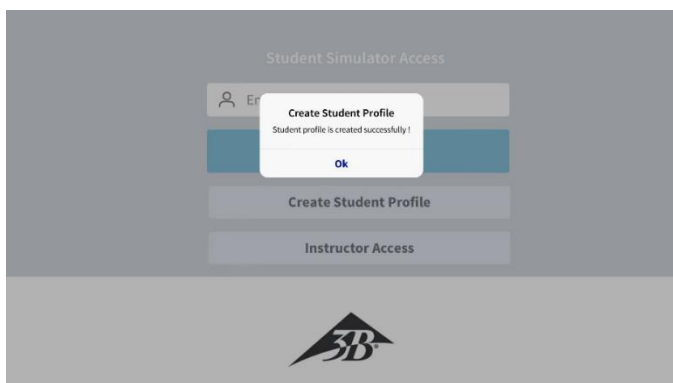


5. 账户注册成功，可以开始培训。

6. 返回软件首页，输入注册的账户，登录软件。

Part E. 设置软件语言和计量单位

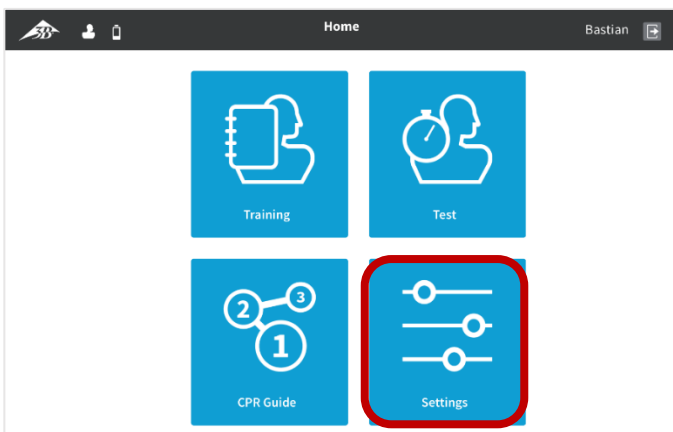

1. 点击主页面“Settings”。

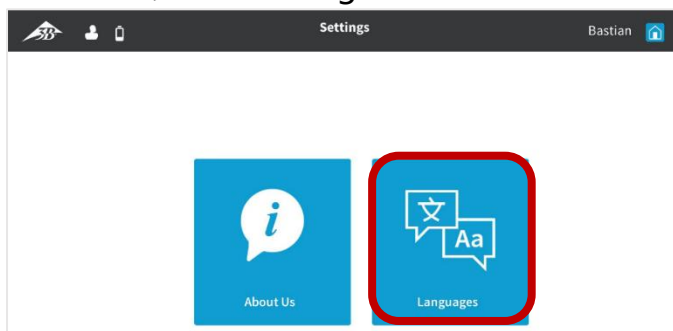

3. 选则“Languages”。



4. 进入语言选择界面，根据需求选择所需语言。



5. 计量单位选择公制 (cm)。

6. 连续点击右上角返回按钮，回到软件主页面。



7. 此时，主页面为中文界面，可以开始培训。若需登录其他账户，则返回至登录界面重复 Part D，此时注册界面也为中文。

8. 点击右上角返回按钮注销账户，即可退出。


Part F. 使用导师平板进行监测



1. 点击导师登录。



2. 此为导师登录界面, 导师账号请查看随模拟人附带的卡片 (卡片与喉罩共同放在透明袋中)。

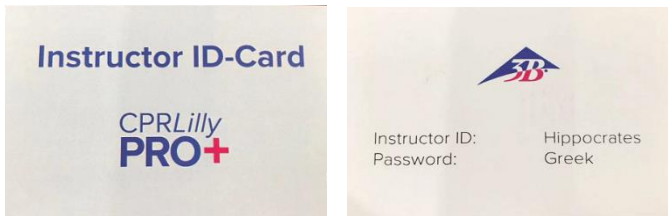

3. 正确输入卡片信息及设置导师姓名。

指导员 ID: Hippocrates

密码: Greek

电子邮件: 输入内容即可。

姓、名: 必填。

机构、培训中心: 选填。




4. 在弹出的窗口中选择需要监测的模拟人, 选择模拟人, 点击确定。




5. 此为导师界面, 根据教学目标, 在主页点击培训或测试。



6. 在弹出的“创建新课程”窗口中点击确定。

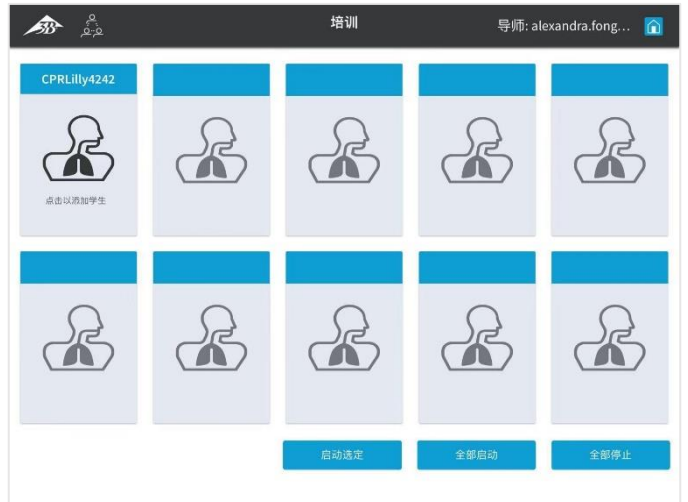

7. 此时可连接的模拟人会出现在页面中, 点击需要监测的模拟人。

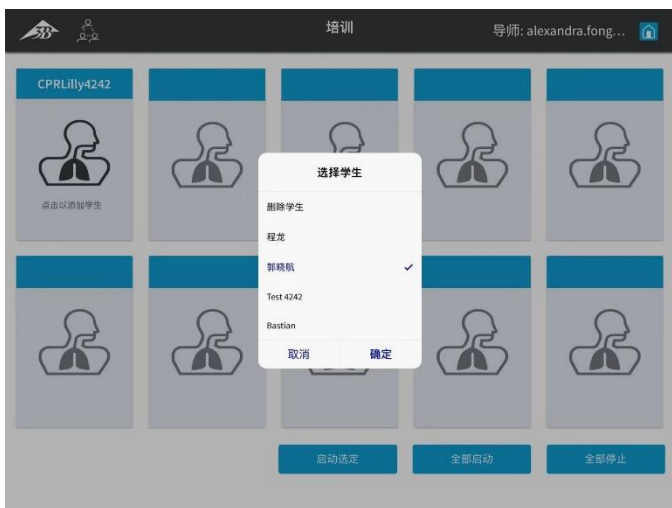

8. 在弹出的名单列表中，选择训练的学员姓名，点击确定（学员姓名必须提前在学员平板中注册）。



9. 此时，模拟器将以学员姓名命名。



10. 选择已命名的模拟器，点击下方“启动选定”或“全部启动”。



11. 窗口中将显示学员操作情况。点击饼状图，可以查看学员操作细节。（操作细节仅实时显示）。

12. 在培训模式中，导师平板和学员平板同时显示数据；在考核模式中，仅导师平板显示数据。

Part G. 模拟人联机

1. 多台模拟人可实现联机功能，导师机可同时监测 10 名学生训练。
2. 模拟人数量为 2-5 台时，可将其中一台模拟人作为路由器，无需额外购买路由器。
3. 模拟人数量为 6-10 台时，需额外购买一台路由器，将路由器作为信号源。
4. 以下介绍将模拟人作为信号源的方法：



5. 登录导师账号进入主页面，点击“设置”。



6. 在设置页面当中点击“网络”。



7. 弹出的窗口显示当前连接的模拟人，点击确定。



8. 此页面为当前模拟人的信息,可切换为“热点”或“网络”。



9. 选择“网络”在网络名称上输入作为路由器的模拟人的网络名称及密码。如：

网络名称: CPRLillyXXX

密码: simadmin

10. 然后点击“确认”,信息提示已正确配置网络。若出现网络配置失败,则重复此步骤直至成功。设置成功后,作为路由器的模拟人将成为信号源。


11. 其他需要关联的模拟人重复本章步骤 5-10。(6-10 台设备需要额外配备路由器,以路由器为信号源。)



12. 待全部加入同一个网络后,再次登录导师账号,在弹出的窗口中可看到所有模拟人编号。



13. 根据教学目标,在主页点击培训或测试,并且为出现的模拟人分别选择训练学员的名字。

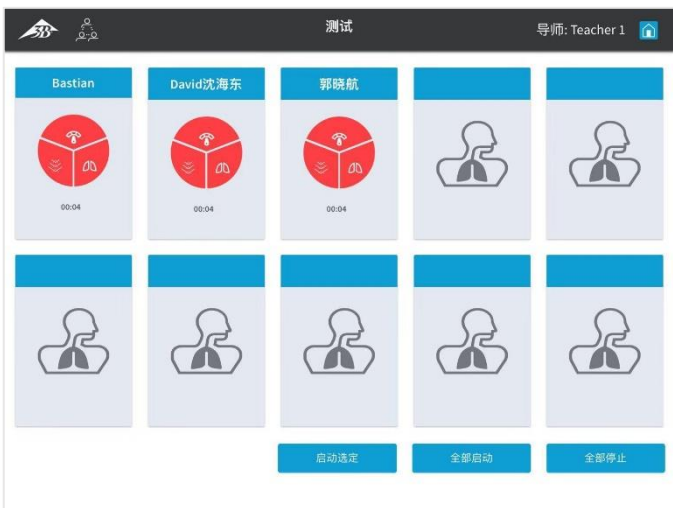

14. 名字正确输入后,点击“全部开始”。则出现多个窗口同时监测的界面。



15. 点击某个学员的饼状图,即可查看该学员的实时的操作细节。点击其他学员,即可进行界面的切换。



16. 考核结束后, 点击“全部停止”, 此时所有学生平板也会同步停止。“X”表明综合成绩为不合格。



17. 如需移除模拟人, 在“设置” - “网络”中选择要移除的对象, 选择热点, 确认即可。

Part H. 查看并导出操作报告


培训师	ID	模拟器	学生姓名	指导员姓名	日期	评分
CPRLilly4242	5	CPRLilly4252	Kira Guo	Kira Guo	30/09/2019	失败
CPRLilly4256	6	CPRLilly4256	haidong Shen	Kira Guo	30/09/2019	失败
CPRLilly4252	0	CPRLilly4242	王小	Kira Guo	30/09/2019	失败
	1	CPRLilly4252	Kira Guo	Kira Guo	30/09/2019	失败
	1	CPRLilly4256	haidong Shen	Kira Guo	30/09/2019	失败
	1	CPRLilly4242	王小	Kira Guo	30/09/2019	失败
	2	CPRLilly4256	haidong Shen	Kira Guo	30/09/2019	失败
	2	CPRLilly4252	Kira Guo	Kira Guo	30/09/2019	失败
	2	CPRLilly4242	王小	Kira Guo	30/09/2019	失败
	3	CPRLilly4256	程龙	Kira Guo	30/09/2019	失败
	3	CPRLilly4242	王小	自我检查	30/09/2019	失败
3	CPRLilly4252	Kira Guo	Kira Guo	30/09/2019	失败	

1. 点击导师主页面中的“结果”, 可查看操作报告, 点击播放按钮, 可查看视频回顾。点击右上角导出报告, 报告会存储在该平板电脑的文件系统内。

2. 在笔记本电脑中下载 iTunes, 将平板电脑与笔记本电脑通过数据线连接。




3. 登录 iTunes 账户。

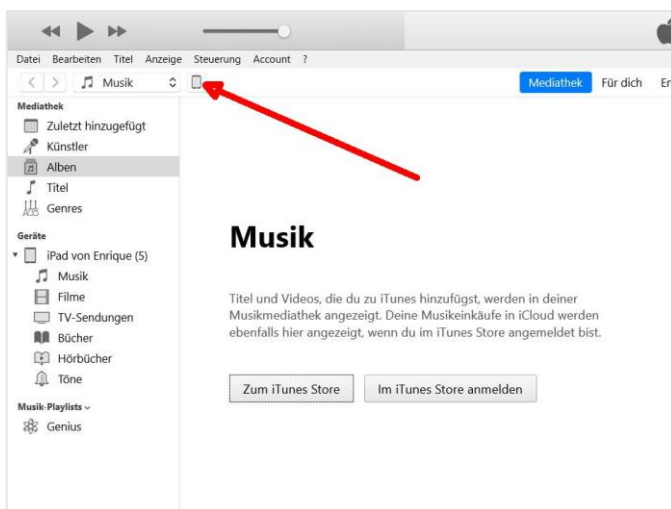

4. 在下载了的 CPRLilly PRO+ 软件内查找 3Bexport files 文件夹。打开文件夹即可查看操作报告。

注: 仅测试模式下会生成准确的操作报告。


Part I. 常见问题

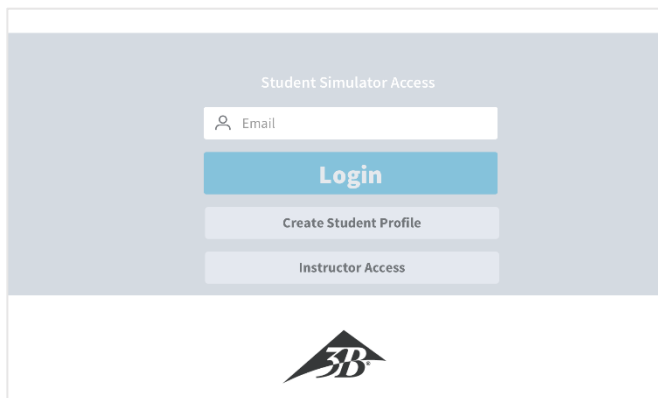

Q1. 打开应用软件，页面为灰色。
表明模拟人信号尚未连接完毕，退出，等待约 30s
再重新进入。



Q2. 电池图标。
用于指示模拟人的电量，当电量不足时请及时充电。

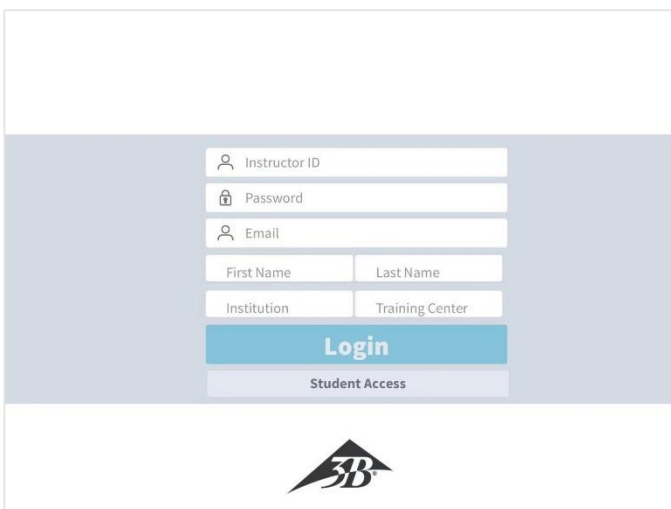

Q3. 导师页面为英文。
通过 Part E. 的方式修改软件语言。