




...going one step further

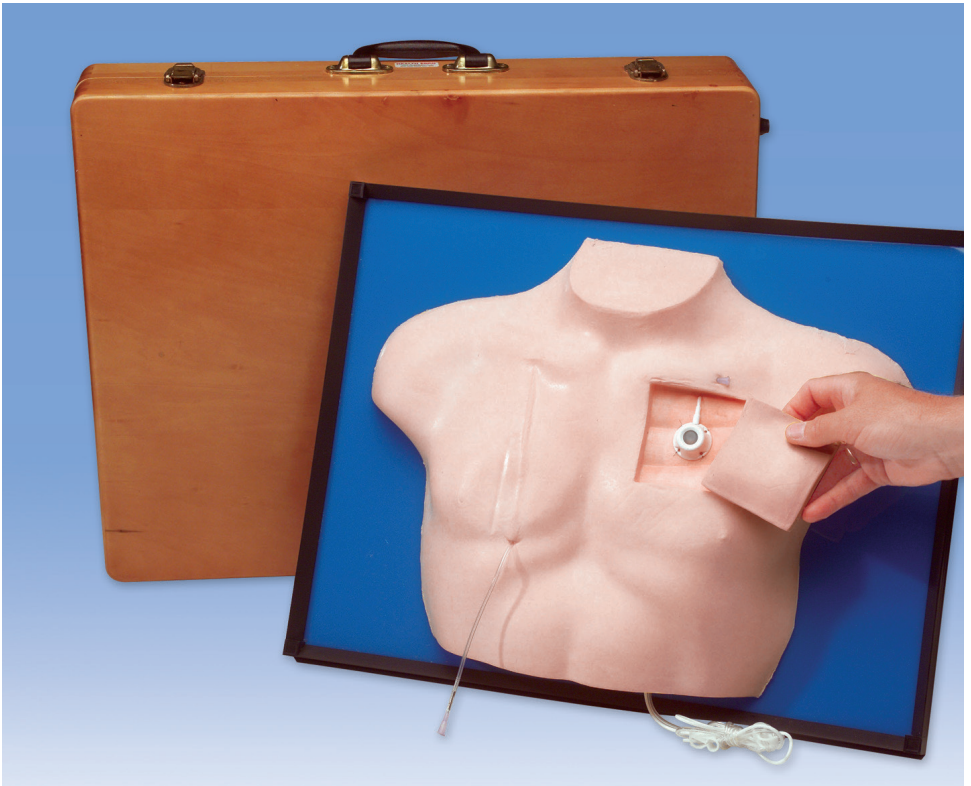

W43007

豪华版中心静脉通路护理训练模型

使用指南:

该模型提供左锁骨下动脉、右锁骨下动脉导管和 PORT-A-CATH® 植入式输液港。使用此模型设置的导管和植入式输液港,可以练习植入式通路和永久导管的护理操作。


- 用于指导患者家属、私人看护、护士等人员学习导管的日常护理。
- “肝素锁”在长期静脉置管输液中的应用。
- 使用导管进行血液测试、注射、输液治疗。
- 通过触诊判断输液港及导管位置。
- 左右锁骨下动脉导管护理。
- 更换连接静脉导管的注射附件。
- 清洁导管部位,纠正错误位置的导管。

尽管此模型可以使用抗凝剂、防腐剂,但在使用前我们建议您在模型的小区域先进行测试。药剂的残留物会堵塞导管,请及时用清水清洗。

清洁和维护:


为确保本产品的最大寿命,在不使用时,将模型保存在其携带箱内。并确保所有的液体都已排出,必要时,使用干净潮湿的软布清洁胸部模型。胸部覆盖输液港的皮肤模块采用仿真 BIOLIKE 材质,使用过程中应小心维护。可以使用肥皂水或温水进行清洁。使用干净的干布覆盖在输液港上轻拍进行清洁。根据需要撒上适量的滑石粉进行干燥。请勿使用带有油墨的材料包裹模型,以免造成永久性污染。当模型不使用时,从端口设备上取下输液港,并将其存储在塑料袋中。

注意: 此模型仅用于医疗教学。

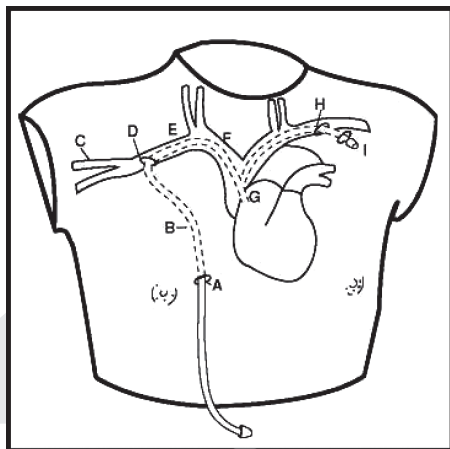

长期留置导管

- A. 导管出口
- B. 导管
- C. 头静脉
- D. 与血管接入点
- E. 锁骨下
- F. 上腔静脉
- G. 右心房
- H. 与血管接入点
- D. 导管出口

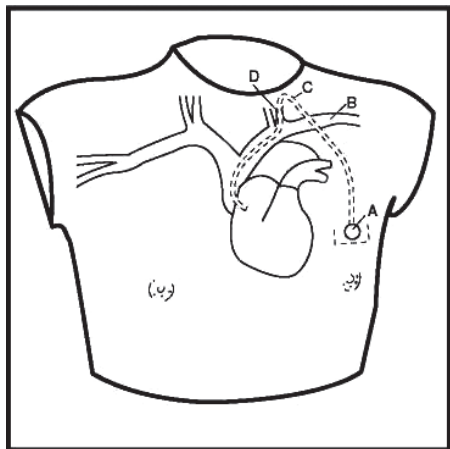

输液港端口

- A. 导管接入点
- B. 锁骨下
- C. 导管
- D. 颈静脉